

Contour[®] plus ONE[»]

Sistem za merenje
glukoze u krvi

Podešavanje planova
„Podsetnika za merenje”
u aplikaciji
CONTOUR®DIABETES




Pre nego da izmenite propisanu terapiju, preporučen način ishrane ili fizičke aktivnosti uvek se konultujte sa vašim lekarom.



Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

Planovi „Podsetnika za merenje“
pomažu vam da dobijete rezultate
koji će vam dati smisleniji pregled
kretanja nivoa glukoze u krvi.

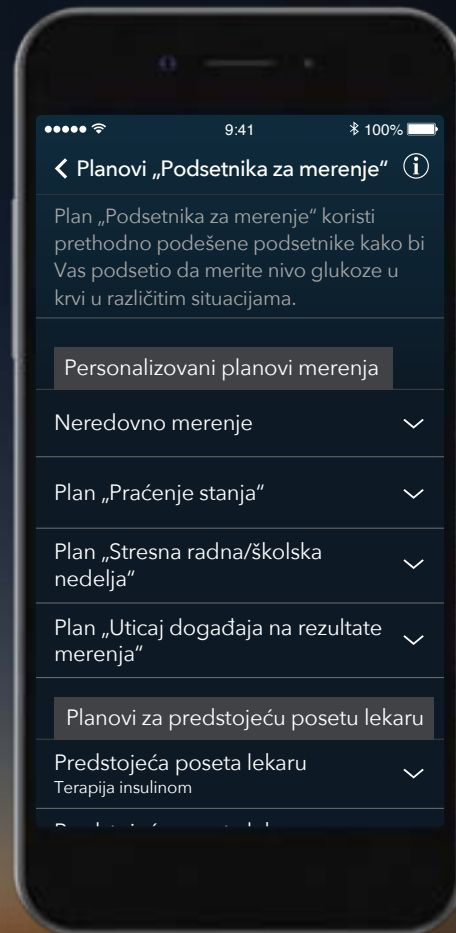


Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem za merenje
glukoze u krvi

1. Plan „Podsetnika za merenje”

Odaberite opciju plan „Podsetnika za merenje” odabirom opcije „Moji podsetnici” u glavnom meniju aplikacije.

Potom dodirnite polje +.

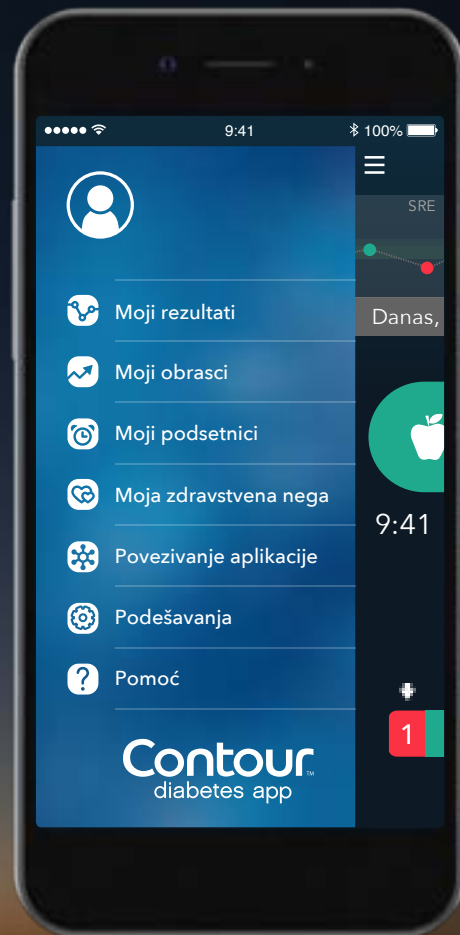


Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

1. Plan „Podsetnika za merenje”

Odaberite opciju plan „**Podsetnika za merenje**” odabirom opcije „**Moji podsetnici**” u glavnom meniju aplikacije.


Potom dodirnite polje +.

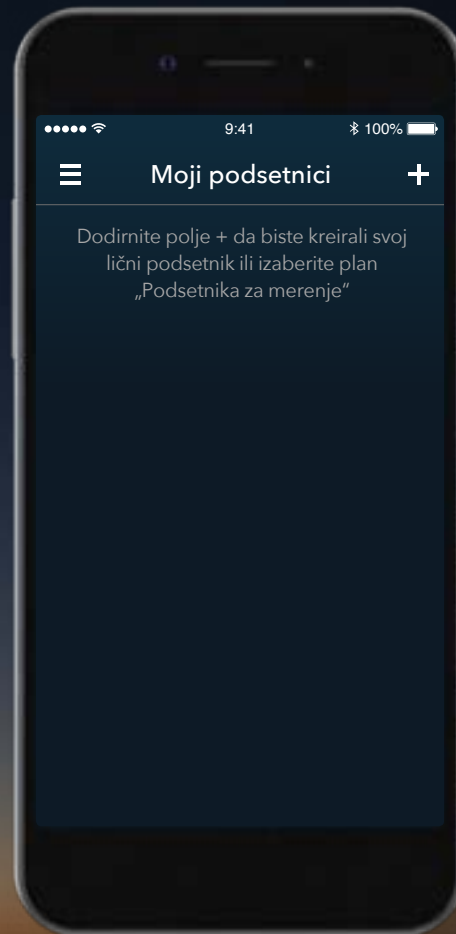

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

1. Plan „Podsetnika za merenje”


Odaberite **Plan „Podsetnika za merenje”** kako biste odabrali plan koji vam najviše odgovara.

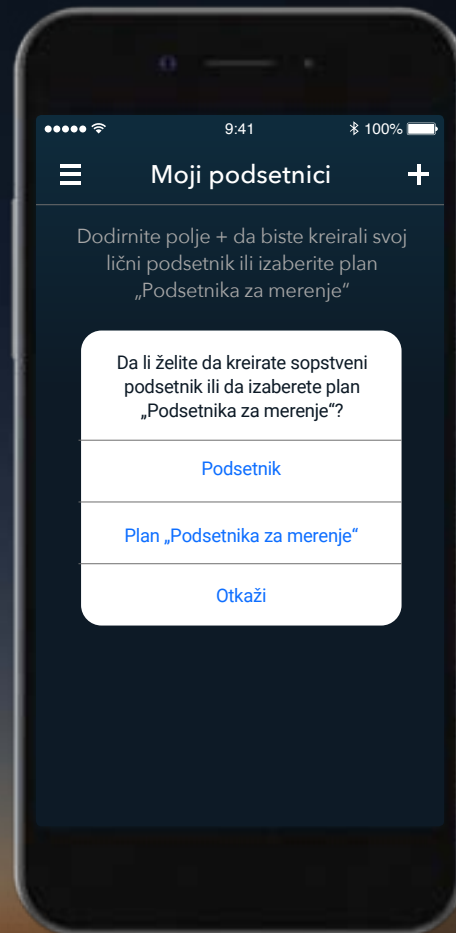

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

2. Plan „Podsetnika za merenje”

Odaberite **Plan „Podsetnika za merenje”** koji vam odgovara

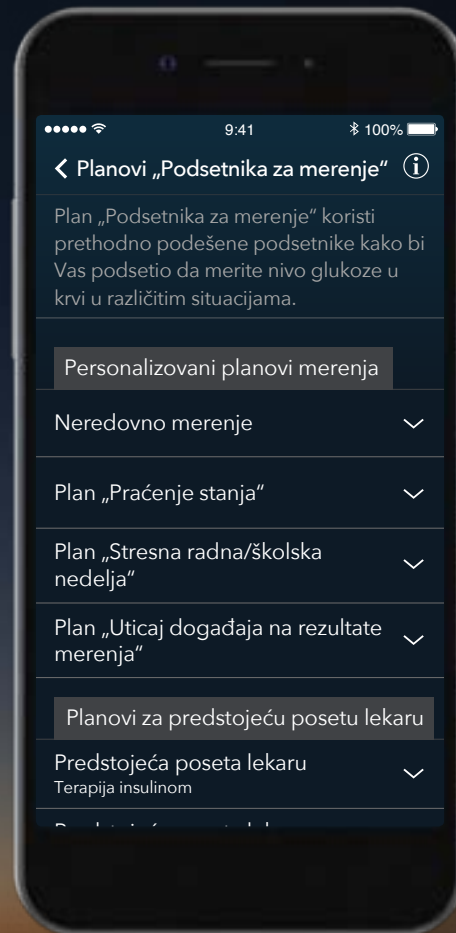


Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

2. Plan „Podsetnika za merenje”

Odaberite **Plan „Podsetnika za merenje”** koji vam odgovara

Dodirnite strelicu pored naziva plana kako bi dobili više informacija o njemu.

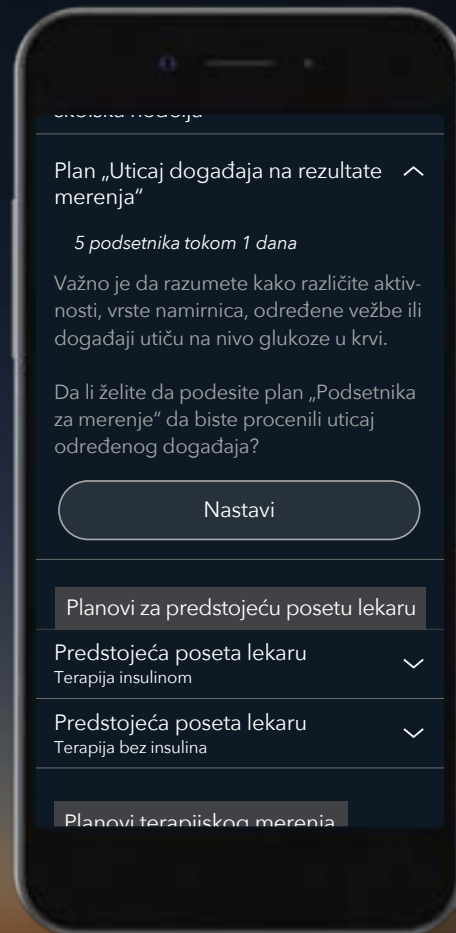


Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem za merenje
glukoze u krvi

2. Plan „Podsetnika za merenje”

Odaberite **Plan „Podsetnika za merenje”** koji vam odgovara

Dodirnite strelicu pored naziva plana kako bi dobili više informacija o njemu.


Odaberite **„Nastavi”** kako biste podesili odabrani **plan „Podsetnika za merenje”**.

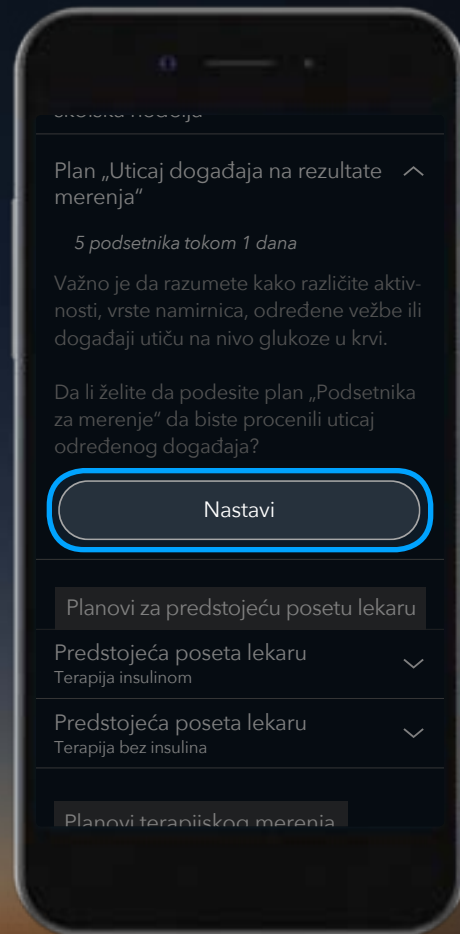

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Plan „Podsetnika za merenje”


Dodirnite polje sa datumom i vremenom kako biste podesili vreme dešavanja događaja čiji uticaj želite da ispratite.

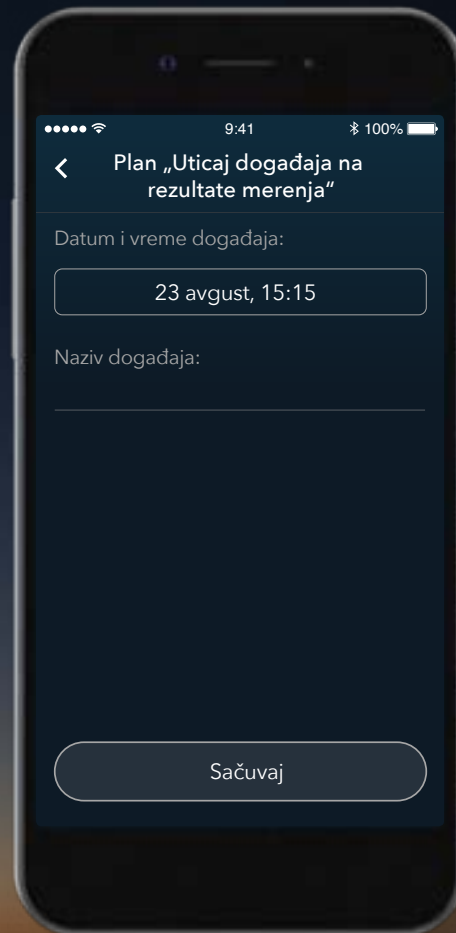

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Plan „Podsetnika za merenje”


Dodirnite polje sa datumom i vremenom kako biste podesili vreme dešavanja događaja čiji uticaj želite da ispratite.

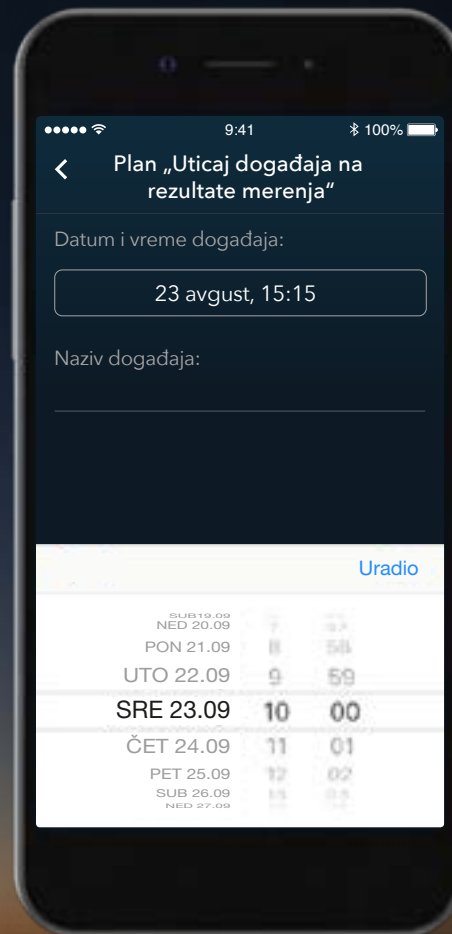

Contour
plus ONE»
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Plan „Podsetnika za merenje”


Dodirnite polje Naziv događaja kako bi se pojavila tastatura i kako bi bili u mogućnosti da imenujete događaj.

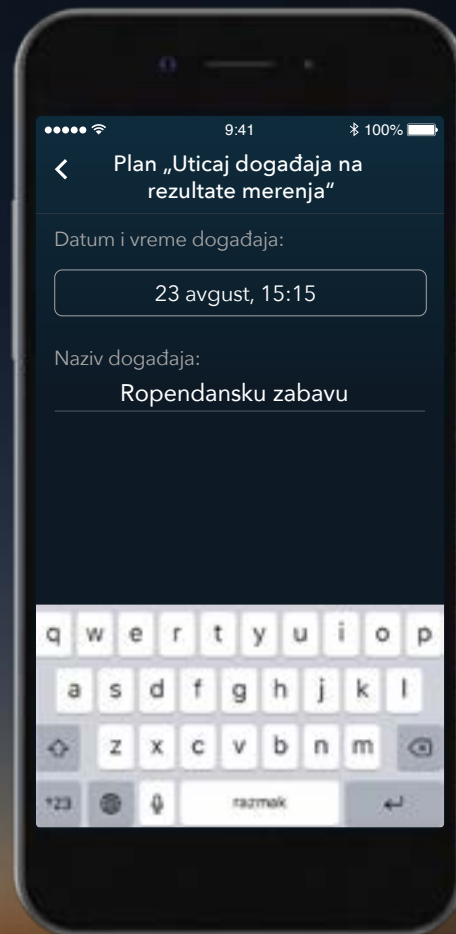

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Plan „Podsetnika za merenje”

Dodirnite polje **Sačuvaj**.

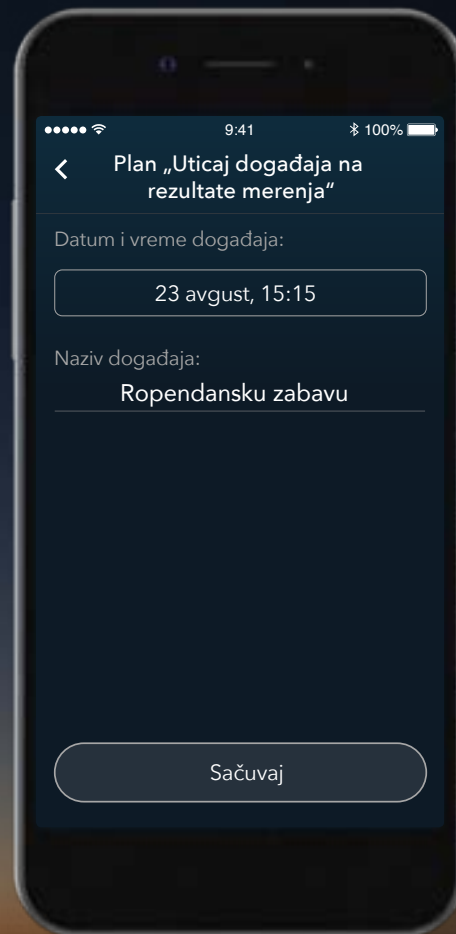


Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Plan „Podsetnika za merenje”

Dodirnite polje **Sačuvaj**.

Vaša podešavanja **Plana „Podsetnik za merenje”** su sada aktivna.

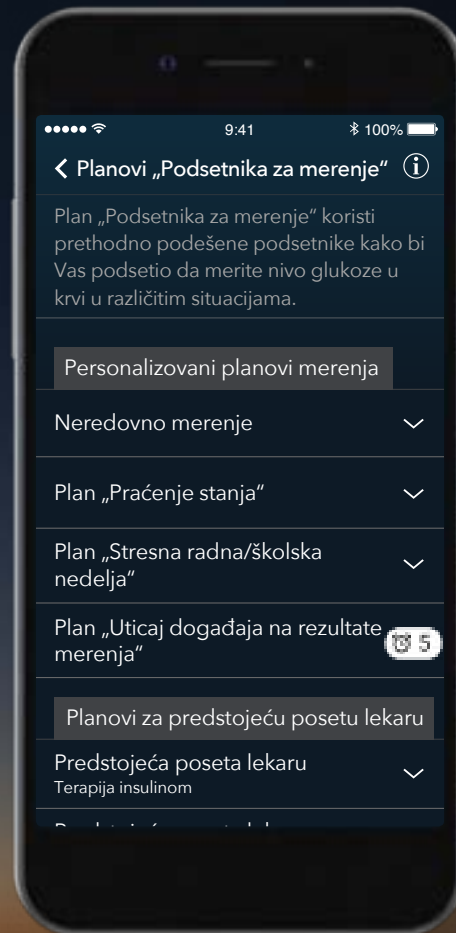

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

Ukoliko imate pitanja u vezi sa aparatom **CONTOUR®PLUS** i aplikacijom **CONTOUR®DIABETES** obratite se vašem zdravstvenom radniku i/ili detaljno proučite uputstvo za upotrebu sistema.

Za više informacija o proizvodima i njihovoj dostupnosti u vašoj zemlji, posetite www.contourplusone.rs



Prikazani podaci pacijenta su hipotetički i koriste se isključivo u demonstrativne svrhe. Pre nego da izmenite propisanu terapiju, preporučeni način ishrane ili fizičke aktivnosti uvek se konsultujte sa vašim lekarom.



Apple i Apple logo su zaštićeni robni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je oznaka usluge Apple Inc. Bluetooth je slovnii znak i registrovana robna marka u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. Bilo kakva upotreba ovih znakova na ovom mestu, je licencirana. Google play i Google Play logo su zaštićena robne marke kompanije Google Inc. Ascensia, Ascensia Diabetes Care Logo i Contour su zaštićene robne marke kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Datum pripreme: Februar 2018, Kod: G.DC.10.2017.52580



Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

Contour[®]
diabetes solutions