

Contour[®] plus ONE[»]

Sistem za merenje
glukoze u krvi

Kako koristiti opciju **Moji Obrasci** aplikacije **CONTOUR®DIABETES**




Pre nego da izmenite propisanu terapiju, preporučen način ishrane ili fizičke aktivnosti uvek se konultujte sa vašim lekarom.




Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

Opcija **Moji obrasci** prepoznaje specifičnije obrazace i trendove u vašim rezultatima merenja, te vas obaveštava o mogućim uzrocima.

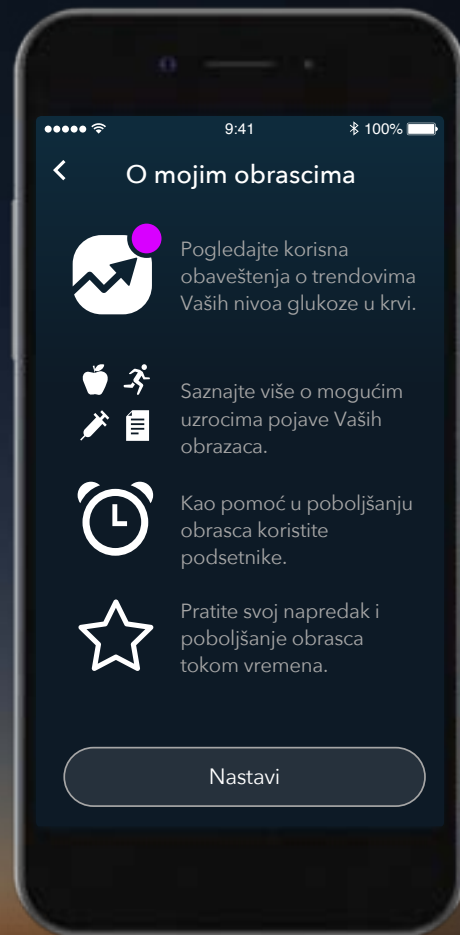

Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
glukoze u krvi


Opcija **Moji obrasci** prepoznaje specifičnije obrazace i trendove u vašim rezultatima merenja, te vas obaveštava o mogućim uzrocima.

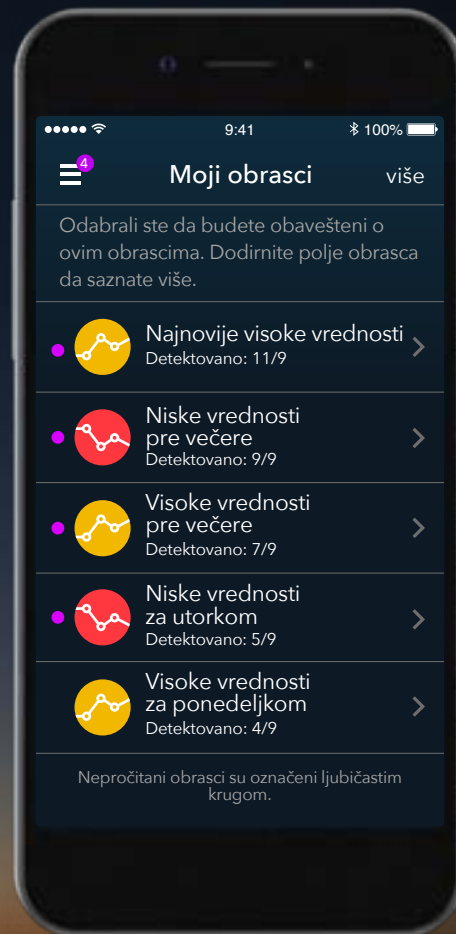

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem za merenje
glukoze u krvi

1. Moji obrasci


Odaberite opciju „Moji obrasci” u glavnom meniju aplikacije.

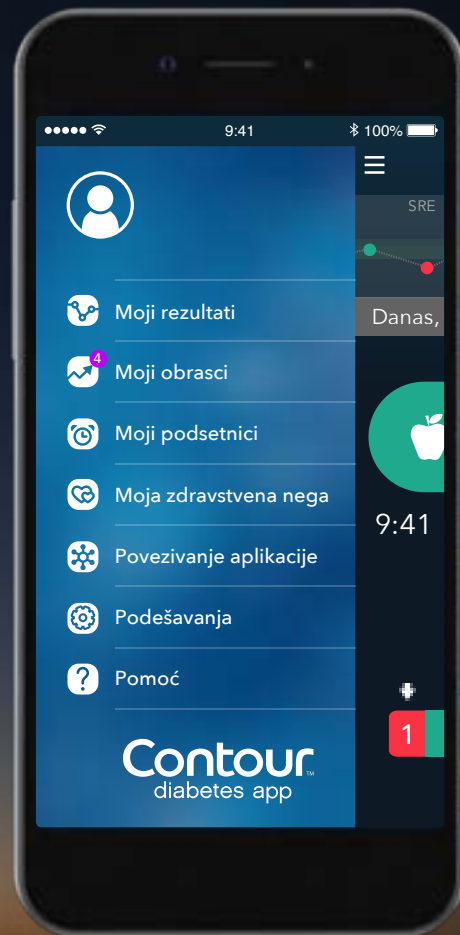

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

2. Moji obrasci


Na početnom ekranu opcije **Moji obrasci** prikazani su obrasci koje ste odabrali. Obrasci koji nisu analizirani, obeleženi su ljubičastim krugom.

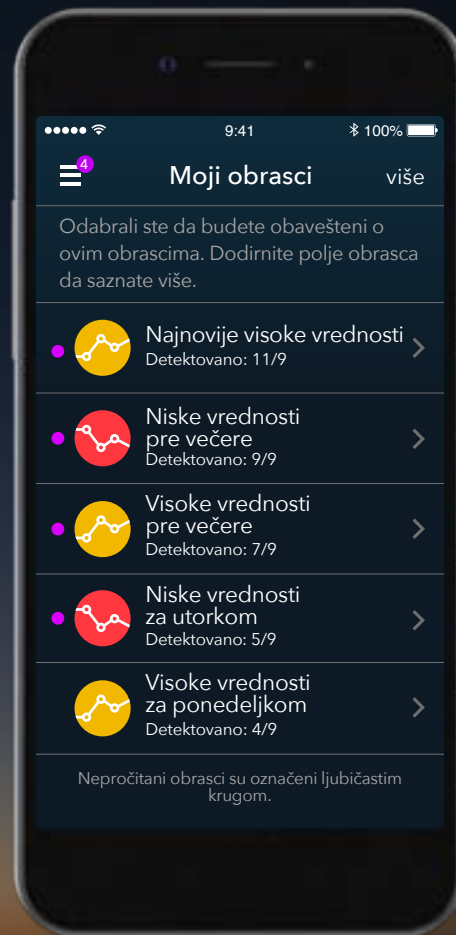

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

2. Moji obrasci


Dodirom na polje Više možete izmeniti Vaš odabir obrazaca ili pregledati arhivu obrazaca.

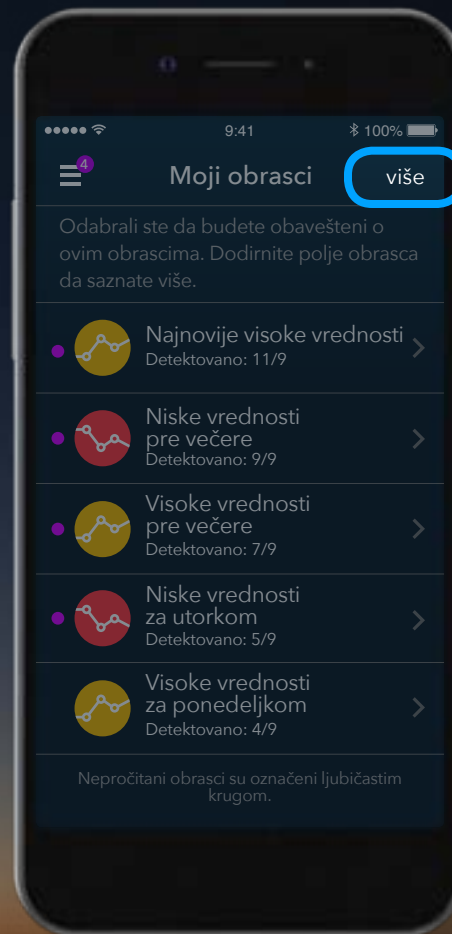

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Moji obrasci


Dodirnite polje **Izbor obrasca**, kako biste odabrali vrstu obrazca za koji želite da dobijate obaveštenja.

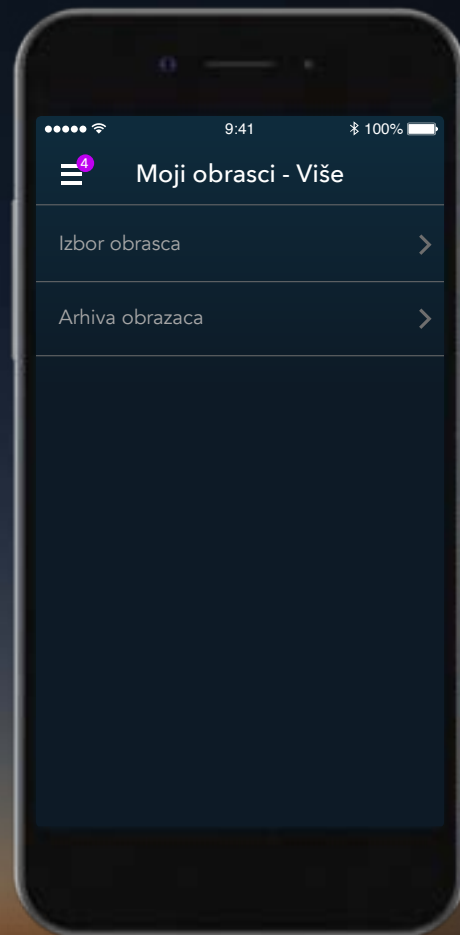

Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Moji obrasci


Dodirnite polje Izbor obrasca, kako biste odabrali vrstu obrazca za koji želite da dobijate obaveštenja.

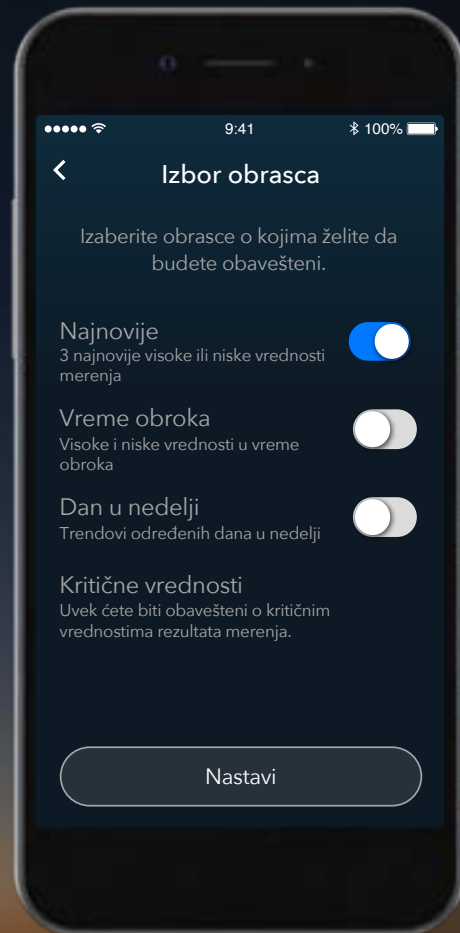

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem za merenje
glukoze u krvi

3. Moji obrasci

Dodirnite polje Izbor obrasca, kako biste odabrali vrstu obrazca za koji želite da dobijate obaveštenja.

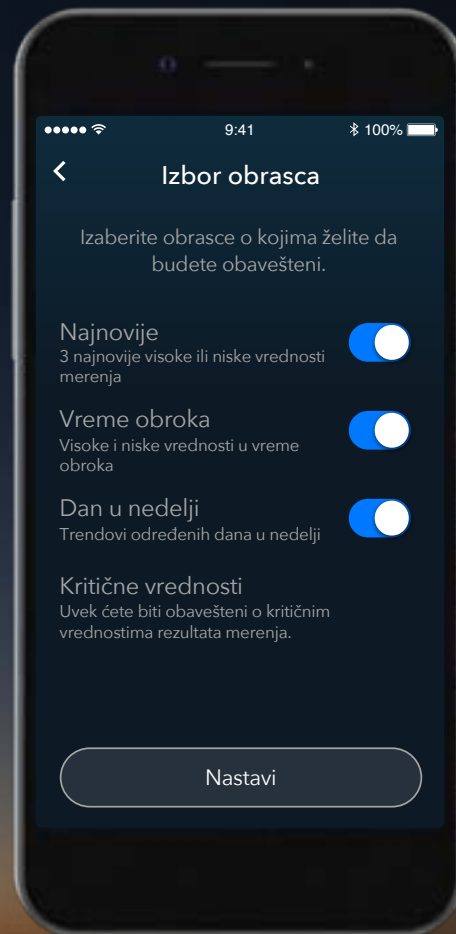


Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

4. Moji obrasci

Svi obrasci koje ste odabrali će biti prikazani na početnom ekranu opcije **Moji obrasci**


Na početnom ekranu opcije **Moji obrasci** prikazani su obrasci koje ste odabrali. Obrasci koji nisu analizirani, obeleženi su ljubičastim krugom.

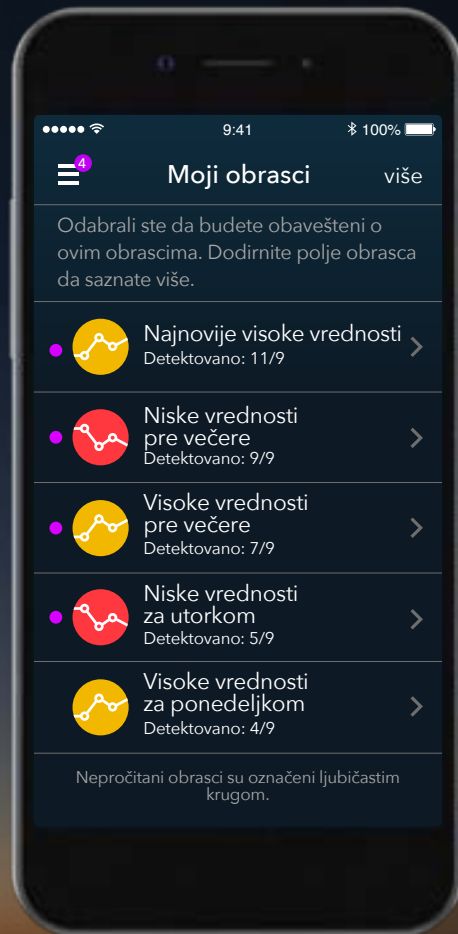

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

4. Moji obrasci

Možete videti detalje svakog obrasca i naučiti više o mogućim uzrocima.

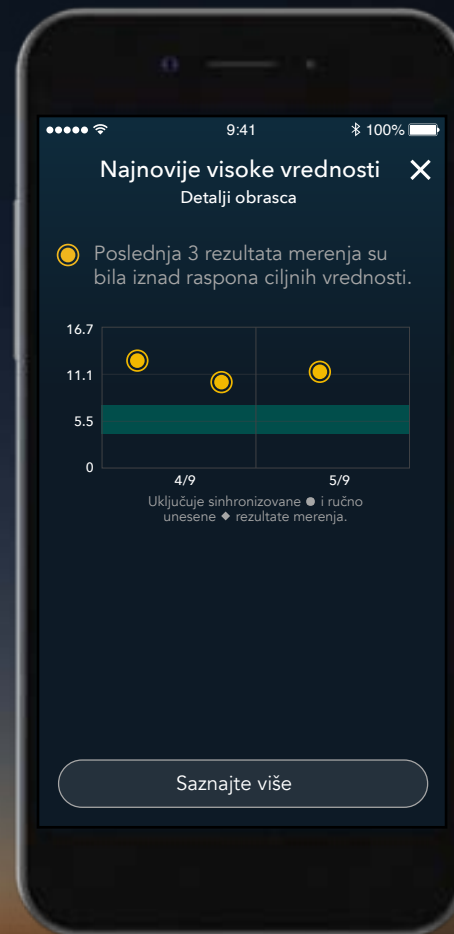

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem za merenje
glukoze u krvi

4. Moji obrasci


Možete da saznate više o tome šta može da uzrokuje nastanak ovih obrazaca, i da odaberete neki od mogućih uzroka, npr. hranu, lekove ili fizičku aktivnost.



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem za merenje
glukoze u krvi

4. Moji obrasci


Takođe možete da podesite podsetnike u vezi sa mogućim uzrocima.

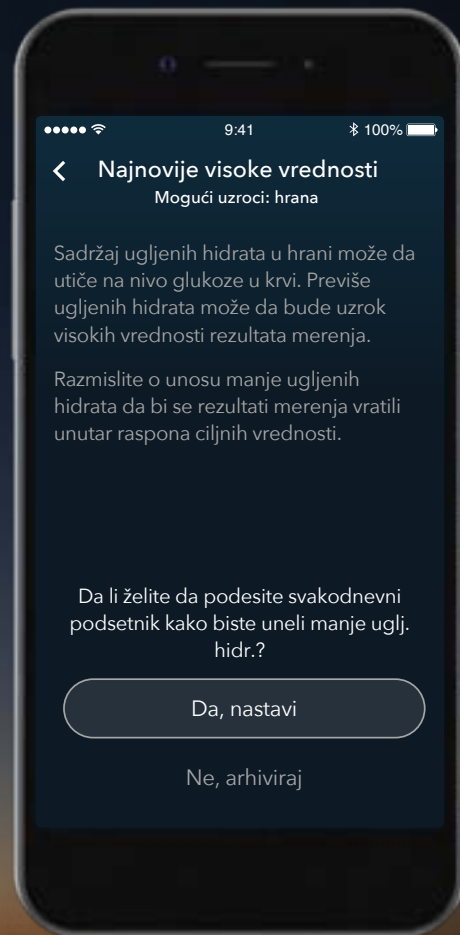

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

5. Moji obrasci


U svakom trenutku, možete se vratiti na željeni obrazac u **Arhivi obrazaca**.

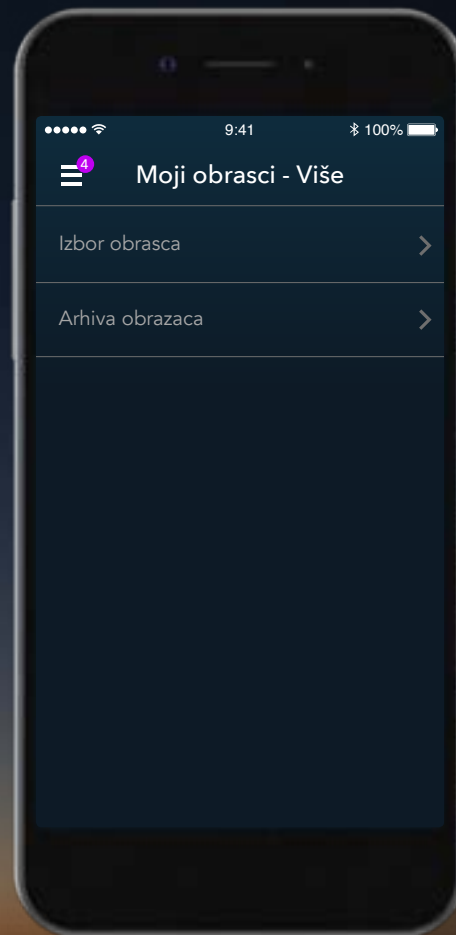

Contour[®]
plus **ONE**»
Sistem za merenje
glukoze u krvi

5. Moji obrasci


U **arhivi obrazaca** možete pregledati koji su obrasci bili detektovani u prošlosti i nisu više aktivni.

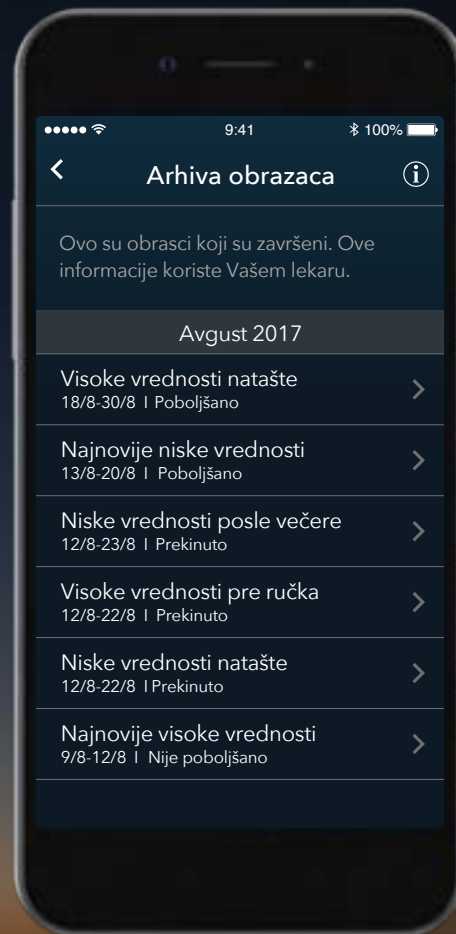

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

5. Moji obrasci

U **arhivi obrazaca** možete pregledati koji su obrasci bili detektovani u prošlosti i nisu više aktivni.

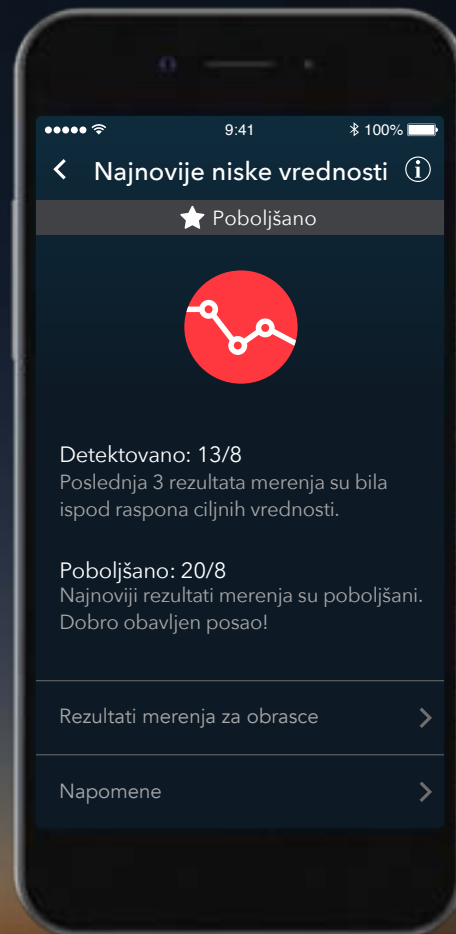

Contour
plus ONE
Sistem za merenje
glukoze u krvi

Ukoliko imate pitanja u vezi sa aparatom **CONTOUR®PLUS** i aplikacijom **CONTOUR®DIABETES** obratite se vašem zdravstvenom radniku i/ili detaljno proučite uputstvo za upotrebu sistema.

Za više informacija o proizvodima i njihovoj dostupnosti u vašoj zemlji, posetite www.contourplusone.rs



Prikazani podaci pacijenta su hipotetički i koriste se isključivo u demonstrativne svrhe. Pre nego da izmenite propisanu terapiju, preporučen način ishrane ili fizičke aktivnosti uvek se konsultujte sa vašim lekarom.



Apple i Apple logo su zaštićeni robni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je oznaka usluge Apple Inc. Bluetooth je slovnii znak i registrovana robna marka u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. Bilo kakva upotreba ovih znakova na ovom mestu, je licencirana. Google play i Google Play logo su zaštićena robne marke kompanije Google Inc. Ascensia, Ascensia Diabetes Care Logo i Contour su zaštićene robne marke kompanije Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Datum pripreme: Februar 2018, Kod: G.DC.10.2017.52578



**Contour®
plus ONE**
Sistem za merenje
glukoze u krvi

Contour[®]
diabetes solutions